

Het overdragen van uw systeem instellingen op het leentoestel.

Wanneer u uw eigen toestel weer terugkrijgt, volg dan dezelfde instructies.

1.

Archiveer de software instellingen van uw eigen scil Vet abc Plus voordat u het systeem omruilt voor het leentoestel:

1. Gebruiker veranderen
2. Selecteer "Admin", password: scil
3. Bevestigen met het vinkje
4. Selecteer "Service" menu
5. Selecteer tabblad "Arch"
6. Selecteer "Software settings"
7. Data exporteren
8. Bevestigen met het vinkje



2.

Wij verzoeken u om de meetkamers leeg te maken van uw scil Vet abc Plus:

1. Selecteer "Service" menu
2. Selecteer tabblad "Serv"
3. Selecteer "Onderhouds functies"
4. Selecteer "Drain Chambers"
5. Cyclus "Drain Chambers" starten



3.

1. Nu kunt u uw eigen systeem uitschakelen via de knop aan de achterkant.
2. Koppel het netsnoer, eventuele koppelingskabel en USB stick af van uw toestel.
3. ReagensPack NIET verwijderen.
4. Plaats het leentoestel.
5. Sluit het netsnoer, eventuele koppelingskabel en USB stick aan op het leentoestel.
6. Plaats uw toestel in de flightcase.

4.

Zet het leentoestel aan en laadt de software instellingen als volgt:

1. Gebruik als profiel "Admin", password: scil
2. Bevestigen
3. Selecteer "Service" menu
4. Selecteer tabblad "Arch"
5. Selecteer "Software settings"
6. Data importeren
7. Bevestigen met het vinkje
8. Gebruiker veranderen
9. Selecteer "Vet", geen password nodig



Wanneer u nog vragen heeft, dan zijn wij altijd te bereiken via **0485-335330**.